



 Coloplast




 Coloplast



 Coloplast



 Coloplast

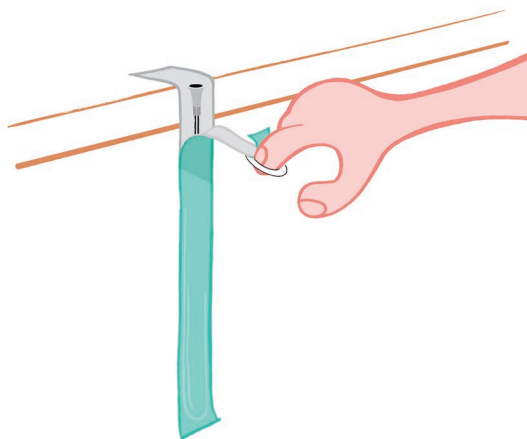





 Coloplast




 Coloplast

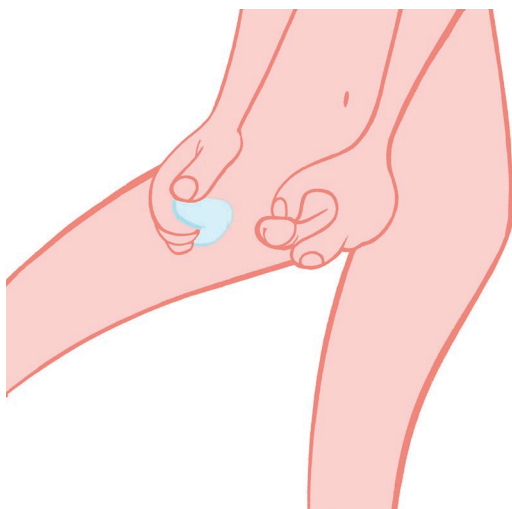

 Coloplast

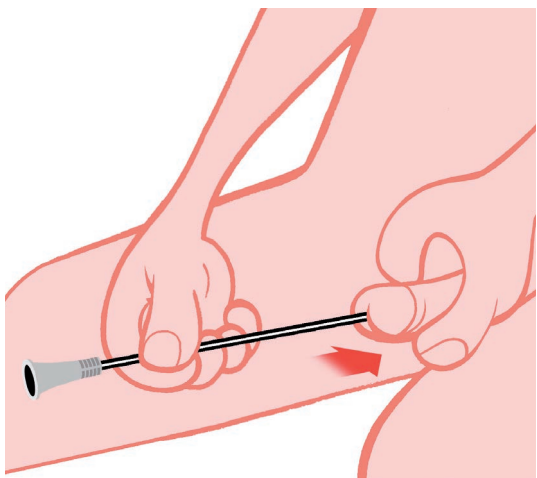

 Coloplast

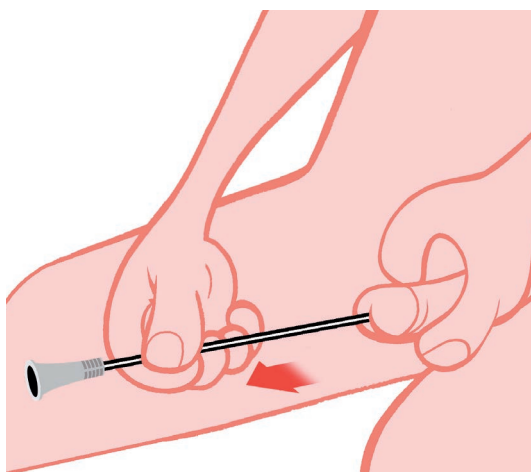



 Coloplast



 Coloplast



 Coloplast

ΕΞΗΓΗΣΗ

”Είναι πιο εύκολο για μένα να συγκεντρώσω ό,τι χρειάζομαι πριν κάνω τσίσα.”



 Coloplast

ΕΞΗΓΗΣΗ

”Είναι σημαντικό να έχω πλύνει τα χέρια μου πριν κάνω τσίσα, έτσι δε θα μπουν μικρόβια στην κύστη μου.”





”Κολλάω τη συσκευασία του καθετήρα σε σημείο που να τον φτάνω. Την ανοίγω τραβώντας προς τα κάτω τον δακτύλιο.”



”Στέκομαι όρθιος δίπλα στην τουαλέτα. Θα με διευκολύνει να προετοιμαστώ για να κάνω τσίσα.”



”Καθαρίζω το πουλάκι μου πριν κάνω τσίσα, ώστε να διώξω τα μικρόβια.”



”Βάζω σιγά σιγά και απαλά τον καθετήρα μέσα στην τρυπούλα που βρίσκεται πάνω στο πουλάκι μου έως ότου δω να βγαίνουν τα τσίσα. Μετά σπρώχνω λιγάκι ακόμα.”





ΕΞΗΓΗΣΗ

”Τραβάω σιγά σιγά προς τα έξω τον καθετήρα. Σταματώ αν δω να βγαίνουν ακόμα τσίσα.”



ΕΞΗΓΗΣΗ

”Είναι σημαντικό να μη μεταδίδω μικρόβια αφού τελειώσω τα τσίσα.”



ΕΞΗΓΗΣΗ

”Μπράβο! Κατάφερα να κάνω τσίσα μόνος μου!”



ΕΡΩΤΗΣΗ

”Γιατί είναι σημαντικό να ξεκινήσεις συγκεντρώνοντας αρχικά ότι σου χρειάζεται;”





ΕΡΩΤΗΣΗ

”Γιατί πρέπει να πλένεις τα χέρια σου πριν κάνεις τσίσα;”



ΕΡΩΤΗΣΗ

”Τι πρέπει να κάνεις με τον καθετήρα πριν κάνεις τσίσα;”



ΕΡΩΤΗΣΗ

”Που πρέπει να στέκεσαι όταν ετοιμάζεσαι να κάνεις τσίσα;”



ΕΡΩΤΗΣΗ

”Γιατί πρέπει να καθαρίζεις το πουλάκι σου πριν κάνεις τσίσα;”





ΕΡΩΤΗΣΗ

”Πώς θα αδειάσεις
την κύστη σου από
τα τσίσα;”



ΕΡΩΤΗΣΗ

”Πόσο γρήγορα βγάζεις
τον καθετήρα από την
κύστη;”



ΕΡΩΤΗΣΗ

”Γιατί πρέπει να πλένεις
τα χέρια σου αφού
τελειώσεις τα τσίσα;”



ΕΡΩΤΗΣΗ

”Γιατί πρέπει να αισθάνεσαι
περήφανος;”

